

介護リフト/Care lift : For improvement of the quality of the care

- 電動介護リフト最小回転半径約 40 cmは在宅のトイレ内移動や脱衣以外にリハビリ・置き場所等に利便性を発揮します。
- 直径 15 cmの大型車輪が畳や絨毯の移動を可能にしました。

## アルファローラ® M-001

株式会社ミハマ

国内初2モーター・デンマーク・ドライブ搭載 エム・レイ・レイ・

¥134,000～ (スリングA・Bはオプション) TAIS(タイスコド) : [01142-000009](tel:01142-000009)

補助制度 「中小企業労働環境向上助成金」では：購入金額¥67,000～【全国共通】

参考価格 「重度障害者日常生活給付」では：購入金額0円～【広島県内】

コンパクトサイズ:全長66～76cm×幅50cm



移動


Person of assistance

リハビリ  
Rehabilita  
tion of the  
user


立位/Stand up



移乗/I transfer from a wheelchair

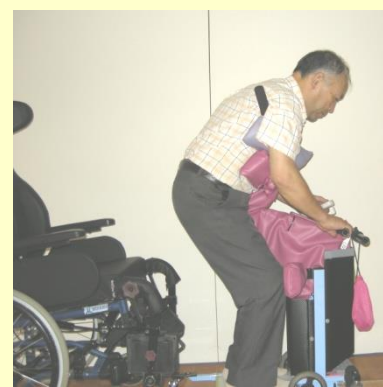

脱衣 / I take off clothes

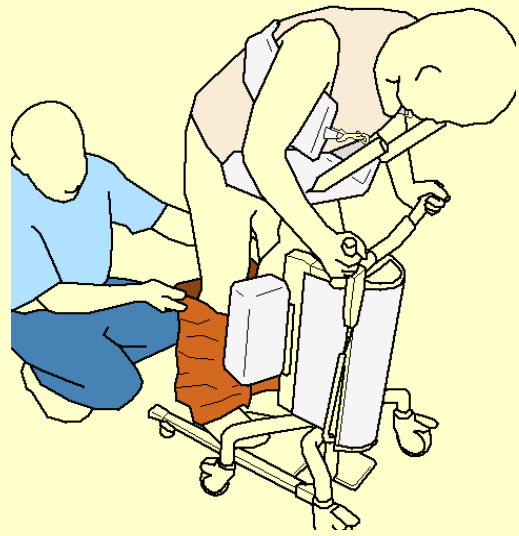

脚が拘縮して伸びた人



膝を保持して  
負担を軽減し  
ます

まひのある人



患側を固定し  
てバランスを  
とります

カスタマイズ

I can customize it

立位姿勢のとれない人



座位姿勢で移  
動できます

膝が内側に拘縮した人



膝を固定  
します

The drive system uses a product made in Denmark.




前後・昇降2つの独立した動きから生まれる『安全』と『安心』

足先に重心を移動しながら預けることができ、立ち上がりが容易になりリフトは膝の負担を軽減します。  
While it travels the center of gravity in the tip of a foot, I can leave it, and a start becomes easy, and the lift reduces the burden of the knee.

※改良のため、予告なく変更する場合があります。

※価格は変更する場合があります。

※地域によっては販売できない地域があります。

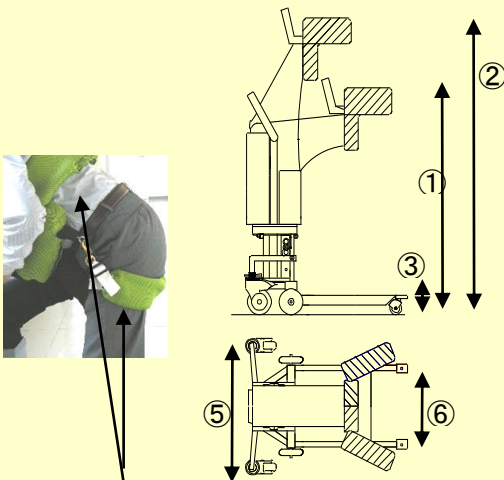

安心ベルト

- ①昇降アーム最低時 約80cm
- ②昇降アーム最高時 約105cm
- ③走行フレーム高さ 約8cm
- ④全長 約66~76cm
- ⑤ベースフレーム全幅 約50cm
- ⑥走行フレーム幅(外寸) 約35~45cm


使用者の最大体重	100kg	
使用者の適正身長	145~180cm	
電源	定格電圧・周波数	交流100v 50/60Hz
	充電装置	充電器(付属品)
バッテリー	型 式	シール鉛電池×2個
最小回転半径【約】	40cm~	
最低地上高さ【約】	2cm	
重量【約】	26kg	
材質/塗装	スチール製/黒色塗装	
車 輪	直径15cm×2、10cm×2、5cm×2	
生産国	日 本	
保 証	メーカー保証1年	

※改良のため、予告なく変更する場合があります。


※価格は変更する場合があります。

※販売できない地域があります。

① **正しい起立** / I can perform right rising.

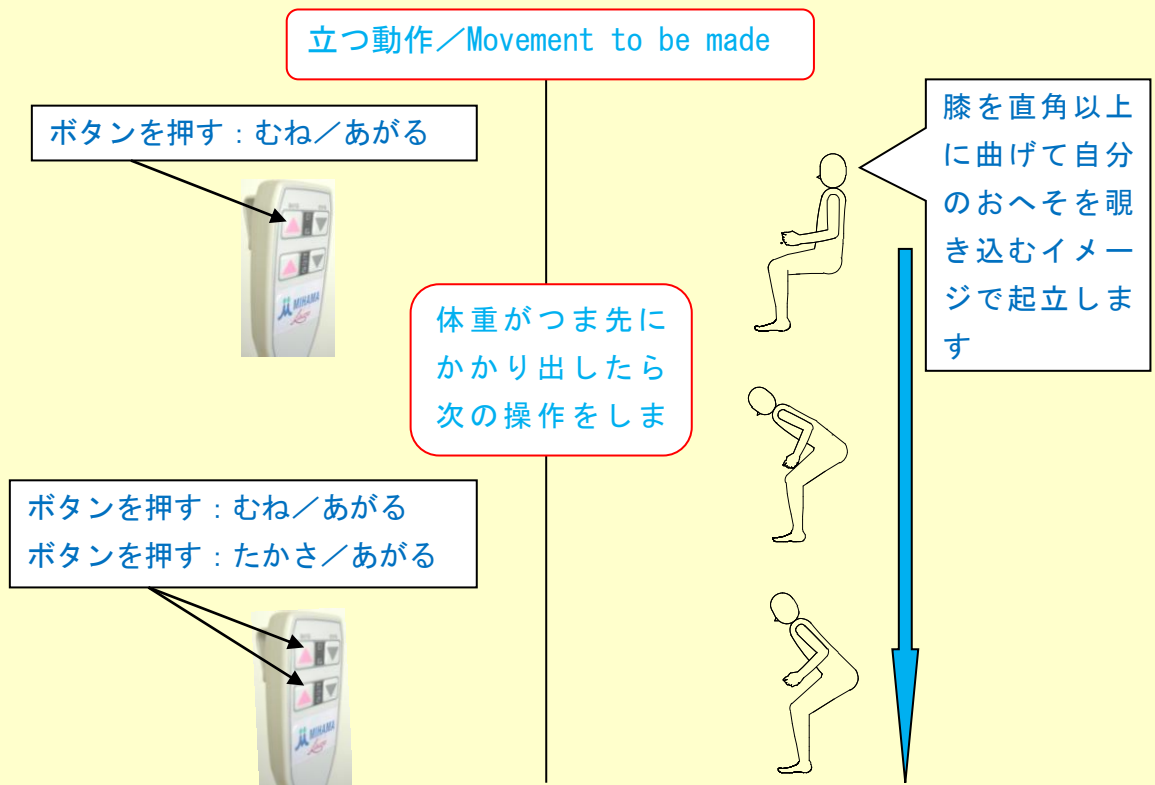

② **スリングが要らない** / I do not need a sling.

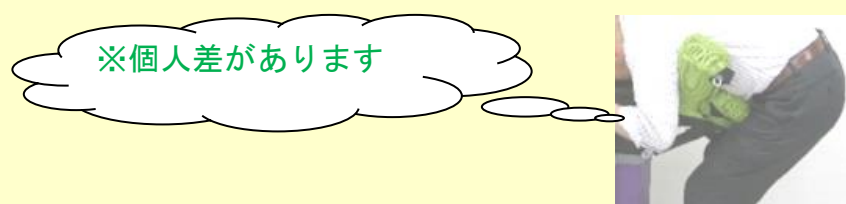

製品、サービスについてのお問い合わせはお気軽に下記まで



0120-456-708

「自分でできた」を創るホットカンパニー

株式会社ミハマ

E-mail : info@mihama-care.jp



ドラッグストア > シニアサポート・介護 > 移動・歩行支援 > [介護リフト](#)

# バッテリー取付け/ Battery attachment means


バッテリー : Battery




取り付け方法①⇒⑩

Attachment means①⇒⑩


①ケース : Case

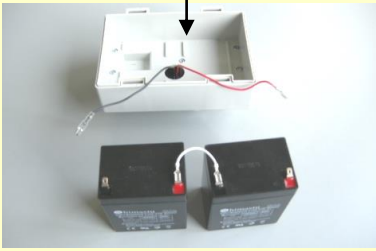

②赤を接続 : I connect red

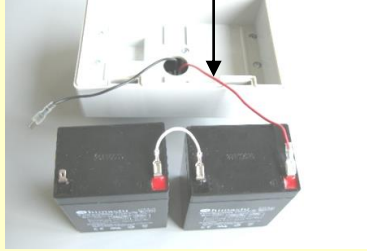

③黒を接続 : I connect black

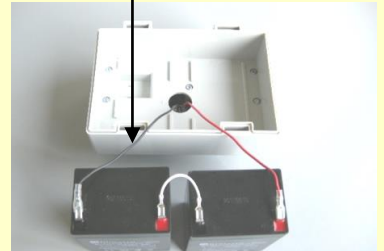

④ケース : It is held by a case



⑤緩衝材 : cushioning



⑥緩衝材 : cushioning



⑦緩衝材 : cushioning




⑧緩衝材 : cushioning



⑨緩衝材 : cushioning



⑩蓋を取り付ける : I attach a cover

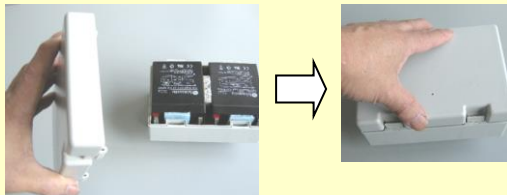

## 海外電源変換プラグ

世界主要国対応 定格入力 250V-6A (A・B・C・O)、250V-13A (BF)  
変換プラグ A・B・BF・C・O タイプセット HPS5

Overseas power supply conversion plug

World rating input 250V - 6A (A B C O) for major country, 250V - 13A (BF) conversion plug A B, BF, C O type set HPS5

